

désinfection

Fiche technique

Primactyl spray

Désinfectant de surfaces. Prêt à l'emploi

Désinfectant pour tous types de surfaces : chromes, inox, vernis, miroiterie, aluminium, verres...
S'utilise en milieu hospitalier : tables d'examen, chariots de transport, matériel d'examen radiologique, salles de soin, chambres des malades... Permet également la désinfection du mobilier et des petits objets tels que : téléphone, poignée de portes, tables, jouets, équipements et accessoires sportifs...
Agréablement parfumé à la menthe. Ne laisse aucune trace sur le support.
Bactéricide. Levuricide. Virucide. (voir au verso pour plus de détails).

Mode d'emploi

S'utilise pur. Temps de contact :
30 secondes à 1 minute. Le rinçage est inutile sauf dans le cas de surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires et les objets pouvant être portés à la bouche.

En milieu hospitalier : pulvériser sur la surface à nettoyer et à désinfecter, puis laisser sécher.

Pour le mobilier : pulvériser la surface et essuyer si nécessaire.

Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5 L,
carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml.

Données techniques

- Aspect : liquide limpide
- pH : 7,7 - 8,7
- Densité : 0,95 - 0,97

Précautions

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

Ne pas mélanger avec d'autres produits antiseptiques.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Stockage

Conditions inhérentes aux produits inflammables.

Sécurité selon FDS

Liquide inflammable, Catégorie 3.

Irritation oculaire, Catégorie 2.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Produit biocide TP 2

Substances actives biocides : chlorure de didécylidiméthyl ammonium, CAS : 7173-51-5, 2,5 g/kg, alcool éthylique, CAS : 64-17-5, 125g/kg - propan-2-ol, CAS : 67-63-0, 104 g/kg.

Date limite d'utilisation optimale :

24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Formule déposée au centre Antipoison France :

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

02-10-23 Ind. 29 ■



ACTIF
SUR CORONAVIRUS
HUMAIN HCoV-229E



EYREIN
INDUSTRIE

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - +33(0)5 55 27 65 27
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com



NORMES

SOUCHES
BACTÉRICIDE

EN CONDITIONS DE PROPRIÉTÉ

NORMES	PUR	30 sec	20°C	SOUCHES
EN 1276	PUR	30 sec	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
EN 13697	PUR	30 sec	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
EN 13727	PUR	1 min	20°C	Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa

LEVURICIDE

EN CONDITIONS DE PROPRIÉTÉ

NORMES	PUR	30 sec	20°C	SOUCHES
EN 1650	PUR	30 sec	20°C	Candida albicans
EN13697	PUR	30 sec	20°C	Candida albicans
EN 13624	PUR	1 min	20°C	Candida albicans

VIRUCIDE

EN CONDITIONS DE PROPRIÉTÉ

NORMES	PUR	1 min	20°C	SOUCHES
EN 14476 spectre limité*	PUR	1 min	20°C	Adénovirus type 5, Norovirus murin, Coronavirus humain HCoV-229E, Virus de la vaccine, H1N1 (virus influenza)
EN14476	PUR	30 sec	20°C	H1N1 (virus influenza)
EN16777 spectre limité*	PUR	1 min	20°C	Adenovirus type 5, Norovirus murin

***SPECTRE LIMITÉ**

autres souches couvertes par la norme

Rotavirus
 Adénovirus type 5
 Norovirus murin
 Virus de la Vaccine
 Filoviridae
 Flavivirus
 Herpesviridae
 Virus de l'hépatite B (VHB)
 Virus de l'hépatite C (VHC)
 Virus de l'hépatite Delta (VHD)
 Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
 Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
 Coronavirus
 Paramyxoviridae
 Virus de la rubéole
 Virus de la rougeole
 Virus de la rage
 Poxviridae